



Arbeitsanweisung

Was	Reinigung und Desinfektion von transvaginalen Ultraschallsonden
Wann	Unmittelbar nach der transvaginalen Ultraschalluntersuchung
Wo	Untersuchungsraum
	Reinigung und Desinfektion
Womit	<ul style="list-style-type: none">• Handschuhe• 1 trockenes Tuch• 2-3 desinfektionsmittel-getränkte Einmaltücher• Produktname:_____ Einwirkzeit:_____• <i>Wenn vom Hersteller des Desinfektionsmittels gefordert:</i> Trinkwasser zum Abspülen
Wie	<ul style="list-style-type: none">• Nach Untersuchungsende wird die Schutzhülle von der Ultraschallsonde entfernt und entsorgt.• Zur Vorreinigung werden die Reste des Kontaktgels mit einem trockenen Tuch entfernt.• Für die Reinigung wird die Sonde mit einem desinfektionsmittel-getränktem Einmaltuch von proximal nach distal abgewischt. Insbesondere werden Fugen und Kanten auf sichtbare Verschmutzungen geprüft. Anschließend wird das Tuch verworfen.• Zur Desinfektion wird die Sonde mit einem neuen desinfektionsmittel-getränkten Einmaltuch vollständig durch mehrmaliges Wischen und rotierenden Bewegungen benetzt. Die vom Hersteller vorgegebene Einwirkzeit wird beachtet.• Handkontaktflächen wie Kabel, Tastatur, Sondenhalterung und bei Bedarf die Flasche mit Ultraschallgel werden ggf. mit einem dritten desinfektionsmittel-getränkten Einmaltuch gereinigt und desinfiziert.• Die Handschuhe werden entsorgt und die Hände desinfiziert.• <i>Wenn vom Hersteller gefordert:</i> Die Sonde wird nach Ablauf der Einwirkzeit unter fließendem Wasser abgespült.
Wer	untersuchende Person
Mitgeltende Unterlagen	<ul style="list-style-type: none">• Produktinformation/Herstellerangaben zum Ultraschallgerät und Desinfektionsmittel• Reinigungs- und Desinfektionsplan